

Блок будильника просигналит 2 раза – это значит успешное подсоединение выполнено. Если вы отсоедините сенсорный разъем от блока будильника, он также просигналит 2 раза.

Управление будильником

Для того чтобы выключить активный будильник, коротко нажмите на кнопку (D); будильник временно утихнет в течение минуты. Чтобы окончательно выключить будильник, отсоедините сенсор от блока будильника. Будильник мигнет и/или выключится звук, просигналив, что он вошел в экономичный режим. Промойте обе стороны сенсора теплой водой и протрите насухо мягкой салфеткой. Поменяйте промокшее белье и установите снова блок будильника и сенсор для того чтобы продолжить вести мониторинг сухих и влажных ночей.

Уход и эксплуатация

Днем отсоединяйте сенсор от блока будильника. Будильник просигналит и войдет в экономичный режим.

Блок будильника «Чамми»

Блок будильника не водонепроницаемый, сохраняйте его сухим все время. Блок будильника не должен контактировать с влагой (жидкостью). Не погружайте его в воду. Не берите его мокрыми руками. Чтобы его почистить, протрите мягкой салфеткой.

Сенсор «Интеллифлекс»

После каждого применения, промойте обе стороны сенсора теплой водой (не горячей) и протрите насухо сухой салфеткой. Не используйте мыло или моющее средство. Не прокалывайте, не скребите, не режьте сенсор. Не погружайте сенсорный разъем в воду.

Долгое хранение

Система «Чамми» по лечению ночного недержания мочи разработана для работы при температуре от 0°C - 50°C. Если вы не собираетесь использовать «Чамми» длительное время, отсоедините сенсор от блока, вытащите батарейки из блока и положите энурезный будильник в сухое прохладное место.

Замена батареек и утилизация

Не смешивайте старые и новые батарейки. Заменяйте старые батарейки на новые вида AAA. Соблюдайте полярность как показано на батарейном отсеке. Утилизируйте использованные батарейки согласно местным экологическим требованиям. Блок будильника и сенсор используйте как неопасную электронную единицу.

Предупреждение

«Чамми» система по лечению ночного недержания мочи не игрушка, держите ее подальше от маленьких детей. Громкий звук может испугать ребенка перед пробуждением, поэтому выбирайте адекватную громкость для вашего ребенка, постепенно, чтобы дать ему немного привыкнуть. Всегда пропускайте шнур сенсора под одеждой ребенка. Сенсор на предназначен для нескольких пользователей. Для соблюдения гигиенических норм используйте новый сенсор для каждого ребенка. Протирайте блок будильника и сенсор каждый раз как его используете.

Гарантия

«Theos Medical Systems» дает гарантию 1 год на блок будильника и 3 месяца на сенсор от дефектов завода изготовителя с даты покупки. Гарантия не распространяется на поломки из-за неправильного использования и пренебрежения правилами эксплуатации. Гарантийная карта прилагается.

Контакты:



2954 Scott Blvd
Santa Clara, CA 95054, USA.
Tel: (408) 239-4050. Fax: (408) 599-3020
Toll free: (800) 230-6775 (USA)
email: support@chummie.com
www.chummie.com
www.theosmedical.com

Компания «ChummieRus»
www.chummie.ru
email: chummie@mail.ru
тел.: 89872666677

Chummie exceeds required performance, construction, and safety requirements. The alarm unit is battery powered and double insulated for added protection. Leakage current across the sensor is less than required for medical surgical devices: less than 8µA in any condition; less than 1µA when sensor is wet.

Chummie, IntelliFlex, One Drop Detection, Flexitape, Active Guard Monitoring, Enhanced Protection Plus Care, SmartFit and the CHUMMIE and Theos Medical Systems logos are trademarks or registered trademarks of Theos Medical Systems,




US patents: 8,237,573, 8,253,573. US and International patents pending.
PN/Ref.: TCE25. Doc.: TCE25-MN-RU-1. Rev. date: 07/2014.

Designed in USA. Manufactured in China.

© 2014 Theos Medical Systems, Inc. All Rights Reserved.

CHUMMIE®
Система для лечения ночного недержания мочи

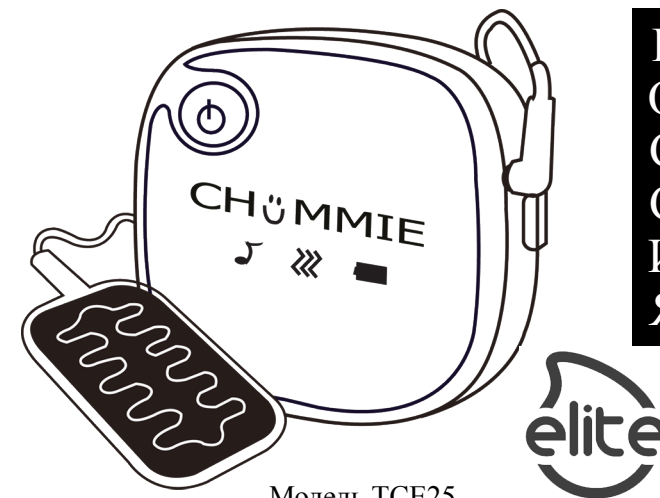

Модель TCE25

Инструкция по применению (на русском языке)

www.chummie.ru

Энурезный будильник «Чамми» применяют для лечения ночного недержания мочи (первичного энуреза) у детей с 4 лет и старше. Когда происходит инцидент ночного недержания мочи, сенсор обнаруживает мочу, блок будильника мгновенно реагирует и сигнализирует: звенит, вибрирует и светит, для того чтобы разбудить вашего ребенка. Со временем, ваш ребенок приучается вставать скорее, чем случится инцидент ночного энуреза и вскоре, самостоятельно проснется раньше, чем кровать будет мокрой. Вы можете выбрать один из 5 тонов и/или вибрацию для того чтобы, ваш ребенок не смог привыкнуть к предупредительному сигналу.


Используйте дневник прогресса, чтобы отследить ежедневный успех вашего ребенка. Успешное лечение требует постоянства и закрепления и может занять несколько месяцев.

Если у вашего ребенка отмечается подряд 14 сухих ночей, лечение ночного недержания мочи можно прекратить

Комплектация (в коробку входит):


Блок будильника, сенсорный датчик влажности, клейкая лента-скотч (10 шт.), руководство пользователя, календарь сухих и влажных ночей, гарантийный талон, батарейки 2 шт. AAA

Краткое руководство пользователя

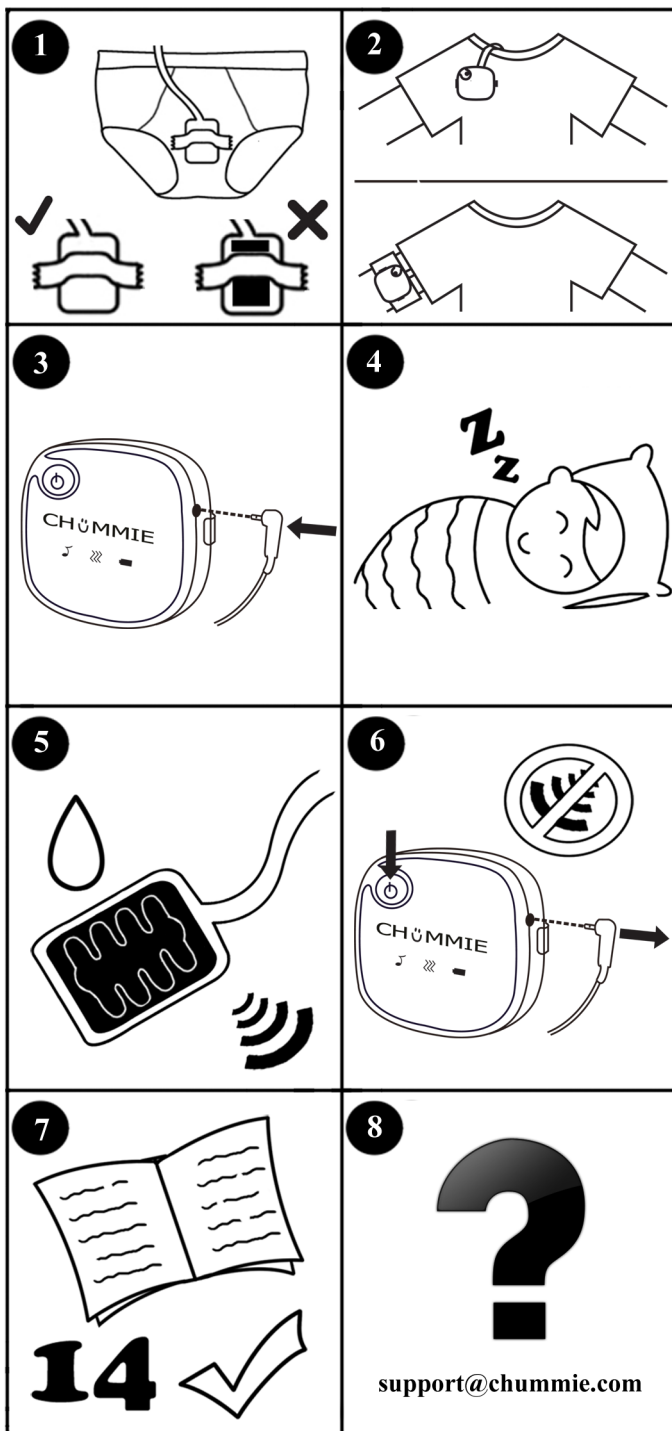


Подробная инструкция

Подробнее о "Чамми"

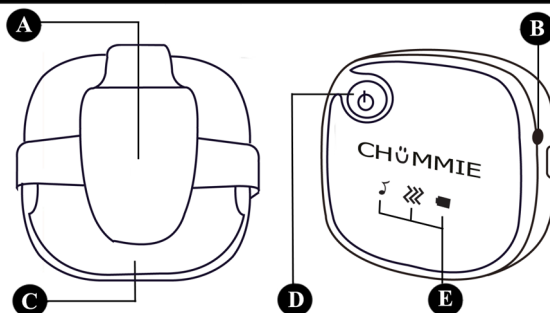

А - пристегивающаяся скрепка (крепление)
 В - гнездо для сенсора С- крышка батарейного отсека
 D - Переключатель Программа
 Е - Умный светодиод

Устанавливаем батарейки

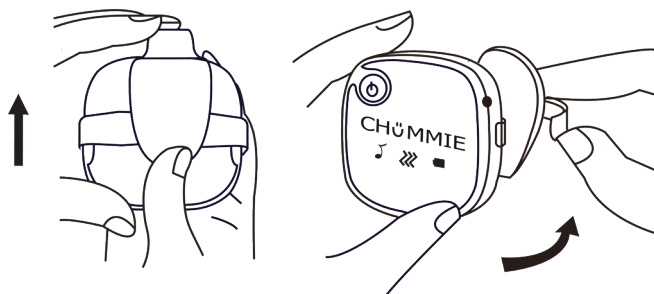

Снимите пристегивающуюся скрепку (крепление) (А) с обратной стороны блока будильника, поддевая кончиком пальца (ногтем) с боков блока и потяните в стороны. Откройте батарейный отсек (С) потянув вниз. Вставьте 2 AAA батарейки (прилагаются) соблюдая полярность. Как только вы вставите батарейки, будильник включится со звуком, вибрацией и светом (тоже самое происходит, если вы вытаскиваете батарейки). Мягко закройте крышку батарейного отсека по направлению к верху блока будильника. Снова установите пристегивающуюся скрепку (крепление).



Если будильник сигнализирует раз в минуту и/или кнопка вкл./выкл. (D) не работает, замените батарейки.



Сенсор должен быть отключен от блока будильника, когда вы устанавливаете режим (звук, свет, громкость или вибрацию).



Чтобы батарейки прослужили вам дольше, отсоединяйте сенсор от блока будильника, когда не используете его.

Устанавливаем звук, громкость и вибрацию




Вы можете выбрать среди 3 конфигураций сигналов: звук и вибрация, только звук или только вибрация. Для того чтобы выбрать сигнал, отсоедините сенсор от блока будильника (отсоедините разъем сенсора от блока будильника, вытащив его из гнезда сенсора) и следуйте шагам ниже.

- ♦ Режим «звук и вибрация»: блок будильника подаст звуковой сигнал и завибрирует одновременно. Обе иконки звук (зеленая) и вибрация (желтая) будут гореть.
- ♦ Режим «только звук»: блок будильника подаст сигнал, а вибрация выключится. Только зеленая иконка (звук) будет гореть.
- ♦ Режим «только вибрация»: блок будильника завибрирует, звук выключится. Только желтая иконка (вибрация) будет гореть.

Будильник входит в ждущий режим через 10 сек после последней установки режима.

Устанавливаем будильник и сенсор

Прикрепите блок будильника около предплечья или на руку при помощи специальной повязки (продается отдельно). Закрепите сенсор передней стороной (черной) на наружную сторону нижнего белья вашего ребенка. Закрепите заднюю часть (белую) сенсора при помощи клейкой ленты (прилагается). А также, вы можете дополнительно закрепить сенсор между двумя парами плавков.

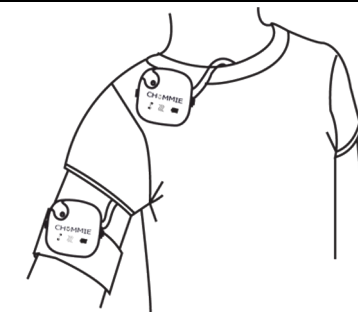

Для того чтобы начать вести контроль над «мокрыми», ночью вставьте сенсорный разъем в гнездо сенсора.



Не прикрепляйте сенсор прямо на кожу. Это может привести к ложным сигналам.