Per iniziare il monitoraggio degli eventi di minzione involontaria, inserite il cavo del sensore nella sua presa. L'unità di allarme suonerà due volte per indicare che la connessione è stata effettua-

GESTIONE DELL'ALLARME E RIUTILIZZO

Per fermare un allarme attivo, premete brevemente il tasto di attivazione; silenzierà temporaneamente l'allarme per 1 minuto. Per disabilitare del tutto l'allarme, scollegate il sensore dall'unità di allarme. Le luci e/o le tonalità dell'allarme si fermeranno, indicando come l'unità di allarme sia entrata in modalità standby (risparmio energia). Lavate entrambe le superfici del sensore con acqua calda e asciugate tamponando con un tessuto morbido. Sostituite gli abiti bagnati e riposizionate l'unità di allarme e il sensore

CURA E MANUTENZIONE

Per riporlo durante il giorno, scollegate il sensore dall'unità di allarme. L'unità di allarme suonerà una volta e entrerà in modalità standby (risparmio energia).

Unità di allarme Chummie

L'unità di allarme non è resistente all'acqua; mantenetela sempre asciutta. Non permettete che l'unità di allarme entri in contatto con i liquidi. Non immergere l'unità di allarme nell'acqua. Non utilizzare con le mani bagnate. Per pulire l'unità di allarme, strofinarla gentilmente con un tessuto morbido.

Sensore IntelliFlex

Dopo ogni uso, lavate entrambe le superfici del sensore con acqua calda (non bollente) e asciugatele tamponando con un tessuto morbido. Non usate saponi o detergenti. Non tirate il cavo del sensore. Non piegate, tagliate o graffiate il sensore. Non immergete la spina del sensore nell'acqua.

CONSERVAZIONE PER LUNGHI PERIODI

Il sistema di trattamento della minzione involontaria a letto Chummie è pensato per operare tra gli 0°C e i 50°C. Se il sistema non viene usato per un periodo prolungato di tempo, scollegate il sensore dall'unità di allarme, rimuovete le batterie dall'unità di allarme, e conservateli in un luogo fresco e asciutto.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE E LORO SMALTIMENTO

Non mettete insieme batterie vecchie e nuove. Sostituite le batterie vecchie con nuove batterie AAA. Inserite le batterie seguendo la polarità indicata nel comparto delle batterie. Smaltite le batterie usate secondo le disposizioni vigenti. Smaltite l'unità di allarme e il sensore allo stesso modo, dove gli apparecchi elettronici non pericolosi vengono smaltiti.

AVVERTIMENTI

Il sistema di trattamento della minzione involontaria a letto Chummie non è un giocattolo; tenetelo lontano dai bambini piccoli. L'allarme può spaventare il vostro bambino quando si sveglia; prendete le dovute precauzioni per permettere al vostro bambino di abituarsi alle tonalità dell'allarme. Fate sempre passare il cavo del sensore sotto la maglietta. Il sensore non è pensato per utenti multipli. Seguite una buona pratica di igiene usando un nuovo sensore per ogni bambino che necessiti del trattamento. Pulite l'unità di allarme e il sensore ogni notte prima dell'utilizzo.

GARANZIA

La Theos Medical Systems garantisce l'unità di allarme CHUM-MIE per il periodo di un (1) anno e il sensore IntelliFlex per un periodo di tre (3) mesi nei confronti di difetti nei materiali e nella realizzazione durante un uso normale dalla data dell'acquisto. Questa garanzia non è trasferibile e non copre l'utilizzo errato, l'abuso o il danneggiamento dovuti a negligenza. Fate riferimento al certificato di garanzia per tutti i dettagli.

Per l'assistenza clienti e/o l'acquisto di accessori, contattate:



2954 Scott Blvd Santa Clara, CA 95054, USA. Tel: (408) 239-4050. Fax: (408) 599-3020 Toll free: (800) 230-6775 (USA) email: support@chummie.com

www.chummie.com

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgrahen 41

Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

Chummie supera tutti i requisiti di funzionamento, realizzazione e sicurezza. L'unità di allarme funziona con batterie ed è doppiamente isolata come protezione aggiuntiva. L'uscita di corrente tramite il sensore è al di sotto degli standard degli apparecchi per uso medico: inferiore a $8\mu A$ in ogni condizione; inferiore a $1\mu A$ quando il sensore è umido.


Chummie, IntelliFlex, Rilevamento a Singola Goccia, Flexitape, Monitoraggio Attivo, Protezione Migliorata Plus Care, SmartFit e il logo di Chummie e della Theos Medical Systems sono marchi o marchi registrati della Theos Medical Systems, Inc.



Brevetto USA: 8,237,573, 8,253,573. In attesa di brevetti internazionali. PN/Ref.: TC300. Doc.: TC300-MN-EN-3. Rev. date: 05/2015. Progettato negli USA. Realizzato in Cina. © 2012-2015 Theos Medical Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.



Sistema Di Trattamento Della Minzione Involontaria A Letto

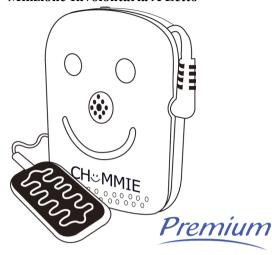

Model TC300 Manuale utente e Guida rapida (Italiano) www.chummie.com

L'allarme per enuresi Chummie viene usato per trattare la minzione involontaria a letto durante la notte (enuresi notturna) nei bambini dai 5 anni in su. Quando accade un incidente di minzione involontaria a letto, il sensore rileva l'urina e l'unità d'allarme suona, con delle luci che si accendono per svegliare il vostro bambino. Nel tempo, il vostro bambino verrà condizionato a svegliarsi sempre più velocemente a ogni incidente, al punto da potersi svegliarsi prima che bagni il letto. Per impedire che il vostro bambino si abitui a un allarme, potete scegliere tra 8 tonalità diverse, adattare il livello del volume e della vibrazione.


Usate il diario dei progressi per annotare i progressi quotidiani del vostro bambino. Un trattamento efficace richiede persistenza e un incoraggiamento positivo, e può richiedere alcuni mesi.

Chummie va utilizzato ogni notte fintanto che non si ottengano almeno 14 notti consecutive di asciutto, dopo di che il programma può essere seguito con discontinuità.

Contenuto della confezione


Unità di allarme Chummie, sensore IntelliFlex, clip a scatto, Flexitape, 2 batterie AAA, manuale utente & guida rapida, diario per i progressi, premio per i risultati, certificato di garanzia.

GUIDA RAPIDA

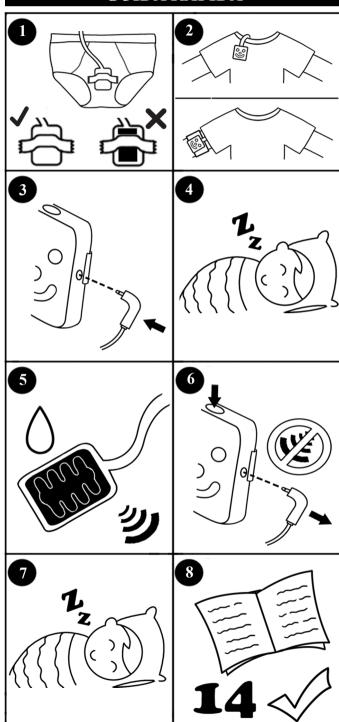

ISTRUZIONI D'USO DETTAGLIATE


CONOSCI IL TUO CHUMMIE

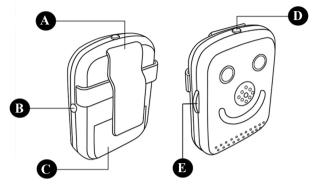

A - Clip a scatto

- B Presa del sensore
- C Porta per la batteria
- D Tasto di attivazione
- E Interruttore del programma (interruttore a 3 posizioni)

INSTALLARE LE BATTERIE

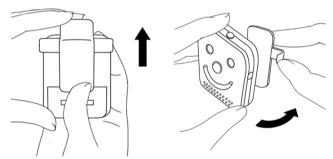

Rimuovere la clip a scatto dal retro dell'unità di allarme facendo pressione sulla parte inferiore della clip verso l'alto oppure rilasciando l'unità d'allarme dai lati della clip. Aprite la porta del comparto delle batterie facendola scorrere verso il basso dell'unità di allarme. Installare le 2 batterie AAA (incluse). L'unità di allarme si accenderà con una serie di suoni, vibrazioni e luci lampeggianti. Gentilmente fate scorrere la porta del comparto delle batterie verso l'alto dell'unità di allarme per chiuderla. Reinserite la clip a scatto.



Se l'allarme suona una volta ogni minuto e/o i tasti dell'unità non rispondono, sostituite le batterie.




Il sensore deve essere scollegato dall'unità di allarme per poter selezionare la tonalità dell'allarme, il livello del volume e la vibrazione.



Per aumentare la durata delle batterie, scollegate il sensore dall'unità di allarme quando non è in uso.

SELEZIONARE LE TONALITÀ, IL VOLUME E LA VIBRAZIONE DELL'ALLARME

Scollegate il sensore dall'unità dell'allarme rimuovendo il cavo del sensore dalla sua presa. Premete brevemente il tasto di attivazione. L'unità di allarme suonerà una volta e attiverà il cambio del programma per 10 secondi. Ora si può procedere con i cambiamenti all'allarme.

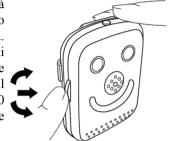

- ◆ Scegliete la tonalità dell'allarme premendo l'interruttore del programma verso il basso. Ci sono 8 tonalità tra cui scegliere.
 La nona tonalità è quella silenziosa - solo con vibrazione e luci.
- ◆ Aumentare o diminuire il volume premendo alternativamente l'interruttore verso l'alto. Il volume basso è circa la metà del volume alto.
- ♦ Attivare o disattivare la vibrazione premendo alternativamente l'interruttore verso il basso.

L'unità di allarme andrà in standby (risparmio energia) 10 secondi dopo l'ultima variazione effettuata con l'interruttore. In modalità standby, l'interruttore è disabilitato.


Per selezionare un nuovo allarme, ripetere i passi precedenti.

INSTALLARE L'UNITÀ DI ALLARME E IL SENSORE

Fissate l'unità di allarme attorno al collo o al braccio usando la fascetta per il braccio (venduta separatamente).

Attaccate il sensore all'esterno dell'indumento intimo del vostro bambino. Assicuratevi che la parte frontale del sensore (la facciata nera) sia a contatto con l'indumento. Fissate il retro del sensore (la facciata bianca) con il Flexitape (compreso).

A scelta, si può fissare il sensore e porlo sotto un paio di

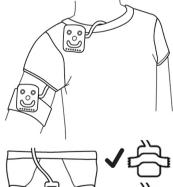

indumenti intimi. Il sensore deve essere girato verso il vostro bambino. Fate passare il cavo del sensore sotto la maglietta.



Non ponete il sensore a diretto contatto con la pelle. Se il sensore tocca la pelle, il sistema potrebbe generare dei falsi